

Ustalenie płci w materiale poronnym wraz z oceną przyczyn poronienia

Zestaw pobraniowy – zrób to sam

W skład zestawu wchodzi:

1. Sterylny zakręcany pojemnik 50 ml.



2. Sól fizjologiczna 30 ml



3. Wkład chłodzący



Wszystkie elementy dostępne są w aptece.

1. Można użyć pojemnika o innej pojemności, najważniejsze by był zakręcany i sterylny.
2. Sól fizjologiczna, marka bez znaczenia.
3. Wkład chłodzący, firma bez znaczenia.

Po pobraniu materiału z poronienia umieszczamy wszystkie elementy zestawu w twardym opakowaniu (np. karton, styropian, pudełko śniadaniowe). Wkład chłodzący musi być schłodzony.

Szczególnie prosimy o **dokładne zakręcenie pojemnika** i ewentualne dodatkowe zabezpieczenie go przed transportem.

Po przygotowaniu zestawu prosimy wezwać **kuriera**, który odbierze zestaw:

800 007 771 lub 665 761 161

W razie pytań prosz o kontakt:



Magdalena Siedlińska
 **665 761 161**