

testDNA 
laboratorium badań DNA

Instrukcja pobierania próbek DNA



Jak pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka

1 godzinę przed pobraniem nie jedz, nie pij, nie żuj gumy, nie pal papierosów. Możesz pić czystą wodę.



1.

Wymij papierowe opakowanie z kartonowej wsuwki



2.

Otwórz papierowe opakowanie i wyjmij 1 wymazówkę




3.

Włóż wymazówkę do ust i potrzyj nią 10x prawy policzek



4.

Umieść wymazówkę z powrotem do papierowego opakowania

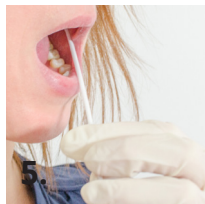

Wymij drugą wymazówkę i powtórz czynność na lewym policzku



6.

Papierowe opakowanie z pobranymi wymazami włóż do kartonowej wsuwki



7.

Podpisz wsuwkę: imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia (nie dotyczy badania anonimowego)



Powtórz czynność 1-7 dla każdego uczestnika badania

Jak pobrać i zabezpieczyć próbki dyskretne tzw. mikroślady

Szczoteczka do zębów, guma do żucia, włosy, szklanka, kubek itp.


ZALECENIA

Nie dotykaj gołymi rękami miejsc, w których może znajdować się DNA. Zanim zbierzesz mokre próbki poczekaj aż wyschną. Dzięki temu nie zapleśnieją. Każdy mikroślad musi być oddzielnie zapakowany i opisany.



1.

Jeśli to możliwe załóż rękawiczki

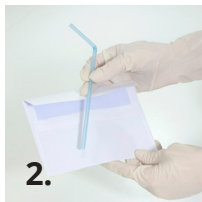


2.

Ślad biologiczny włóż do czystej papierowej koperty



3.

Zamknij i podpisz do kogo należy próbka

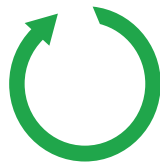

Powtórz czynność 1-3 dla każdego uczestnika badania



Próbki szklane tj. np. szklanka, kubek itp. najlepiej włożyć do pojemnika spożywczego lub kartonu i dodatkowo zabezpieczyć przed przemieszczaniem folią bąbelkową lub papierem.

Pobrane próbki odbierzemy kurierem

Szybko i wygodnie z dowolnego adresu

Zamów **BEZPŁATNEGO KURIERA**



796 645 008

Pon-pt: 7:00 - 23:00

Weekend i święta: 8:00 - 21:00

www.testdna.pl/kurier

