


# Przygotowanie przesyłki dla kuriera krok po kroku




## Przygotuj:

- Kartonowe lub plastikowe pudełko (A)
- Uzupełniony formularz zlecenia badania (B)
- Kopertę bąbelkową (C)
- Czarny marker lub flamaster (D)
- Kompres/gaza (E)
- Woreczek (F)
- list przewozowy (G)

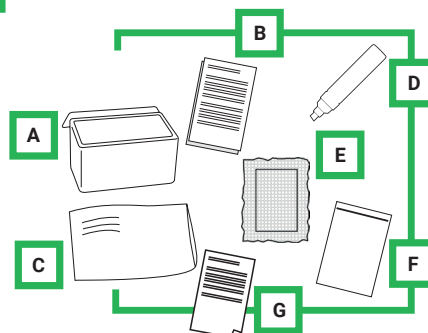


## **Ważne: Do badania nie przyjmujemy całych płodów!**

- Zakrętkę sterylnego pojemnika (z materiałem z poronienia w soli fizjologicznej) oklej dookoła taśmą klejącą, plastrem lub parafilmem, tak aby nie doszło do rozlania soli fizjologicznej.
- Pojemnik z solą obłóż dookoła kompresem lub gazą. Następnie włóż do woreczka.
- Zabezpieczony pojemnik umieść w sztywnym opakowaniu, np. małym kartonie lub plastikowym pudełku itp.
- Wolne przestrzenie między opakowaniem a pojemnikiem wypełnij folią bąbelkową, watą lub papierem, aby uniknąć przesuwania pojemnika w czasie transportu. Przy wysokich temperaturach zalecamy włożenie wkładów chłodzących (są dostępne w aptekach).

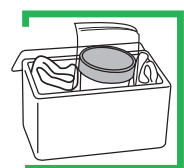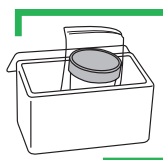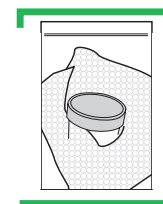

## 5. Do koperty bąbelkowej zapakuj:

- Kartonowe/plastikowe pudełko z materiałem w soli fizjologicznej
- Formularz zlecenia badania

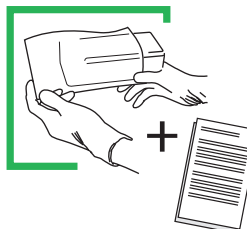

## 6. Jeśli posiadasz list przewozowy przyklej go na kopertę lub zaadresuj:


Laboratorium testDNA

ul. Dułęby 7, 40-833 Katowice

oraz napisz dużymi literami informację dla kuriera:

**UN3373 Biological Substance Category B.**

(Osobiste dostarczenie próbki po wcześniejszym kontakcie tel. pod numerem 730 390 056)

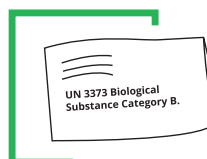

## 7. Tak zapakowaną przesyłkę przełącz kurierowi.