

Instrukcja pobierania próbek DNA



Jak pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka


1 godzinę przed pobraniem nie jedz, nie pij, nie żuj gumy, nie pal papierosów. Możesz pić czystą wodę.



1.
Wyjmij papierowe opakowanie z kartonowej wsuwki



2.
Otwórz papierowe opakowanie i wyjmij 1 wymazówkę

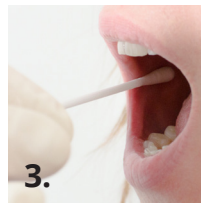

3.
Włóż wymazówkę do ust i potrzyj ją 10x prawy policzek



4.
Umieść wymazówkę z powrotem do papierowego opakowania



5.
Wyjmij drugą wymazówkę i powtórz czynność na lewym policzku



6.
Papierowe opakowanie z pobranymi wymazami włóż do kartonowej wsuwki



7.
Podpisz wsuwkę: imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia (nie dotyczy badania anonimowego)



Powtórz czynność 1-7 dla każdego uczestnika badania

Jak pobrać i zabezpieczyć próbki dyskretne tzw. mikroślady


Szczoteczka do zębów, guma do żucia, włosy, szklanka, kubek itp.

ZALECENIA

Nie dotykaj gołymi rękami miejsc, w których może znajdować się DNA. Zanim zbierzesz mokre próbki poczekaj aż wyschną. Dzięki temu nie zapleśnieją. Każdy mikroślad musi być oddzielnie zapakowany i opisany.




1.
Jeśli to możliwe załóż rękawiczki

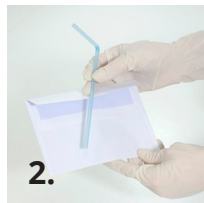

2.
Ślad biologiczny włóż do czystej papierowej koperty



3.
Zamknij i podpisz do kogo należy próbka

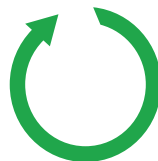

Powtórz czynność 1-3 dla każdego uczestnika badania



Próbki szklane tj. np. szklanka, kubek itp. najlepiej włożyć do pojemnika spożywczego lub kartonu i dodatkowo zabezpieczyć przed przemieszczaniem folią bąbelkową lub papierem.

Pobrane próbki odbierzemy kurierem

Szybko i wygodnie z dowolnego adresu

Zamów BEZPŁATNEGO KURIERA



Pon-pt: 7:00 - 19:00

Weekend i święta: 9:00 - 17:00

www.testdna.pl/kurier



testDNA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bocheńskiego 38a | 40-859 Katowice